

抗原検査キット

唾液式

CE認定
国内検品

- 検査用 取扱説明書 -

1回用

【はじめに】

ご使用に際しては注意事項をよくお読みいただき、ご使用される方ご自身の責任による自己採取のもと正しくご使用してください。

【注意事項】

本キットは、研究用製品の為、日本での確定診断には使えません。

本キットは、新型コロナウイルス抗原(SARS-CoV-2)の有無を判定します。

本キットは、体内のウイルス量、検体の量、検査タイミングによっては検出できない可能性があります。

本キットの判定が陰性であっても、SARS-CoV-2感染を否定するものではありません。

本キットで陽性の結果は、病歴、RT-PCRなど、その他の利用可能なデータと併せて

検討する必要がありますので、医療機関に相談してください。

本キット使用により発生したいかなる損害および損失について、弊社では責任を負いません。

【セット内容】

● テストカード 1個
※袋に入っています。

● 抽出チューブ 1本

● 検体採取カップ 1個

● 取扱説明書(本書)




検査前について

※検査前に必ずお読みください

- 検査は室温(15~30℃)で行ってください。
- 唾液サンプルを採取する30分前、口の中の異物を水ですすいでください。
- 検査直前の飲食・歯磨き・うがい・喫煙などはお控えください。
- テストカードは開封後、30分以内にご使用ください。
- 検査時、テストカードは平らな場所において行ってください。


検査手順

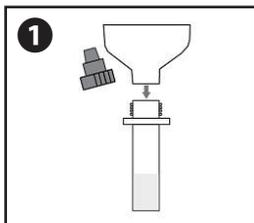


① 抽出チューブのキャップを外し、検体採取カップを取り付ける。



② 唾液を採取カップに出し、抽出チューブに入れる。
※唾液の量は2~3ml(約小さじ1/2杯)入れてください。

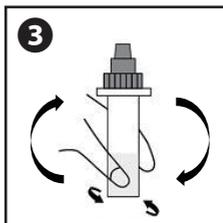

③ 採取カップを外し、抽出チューブにキャップをしっかりと取り付ける。抽出チューブを5回上下に逆転させながら、内部の抽出バッファと混ぜる。

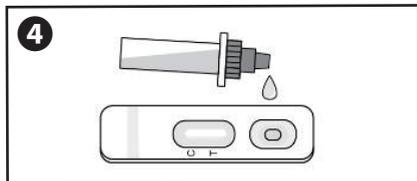

④ で混ぜた液をテストカード下段の穴に4滴入れます。

→15分後に検査結果の確認をします。

※20分以降の判定は無効になります。

※テストカードは水平な場所に置いて動かさないでください。

判定方法

※数分経過すると[C][T]の場所に線が出ます。

陰性

Negative



コロナウイルス抗原が存在しないか、検出レベルを下回っています。


陽性

Positive



コロナウイルス抗原が存在します。他の診断情報を取得してください。

無効

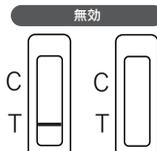

Cラインに線が出ない場合は無効です。溶液が不十分か利用方法が不適切な可能性があります。新しいキットで再度お試しください。