

RS-E1526 2in1 温度計・ディスペンサー 取り扱い説明書

SARARI TOCTOR

本製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。安全かつ適切にご使用頂くため、本書をお読みの上で用法を守って正しくお使い下さい。また、いつでもお読みいただけるように大切に保管して下さい。

お問い合わせ

販売・転売・中古販売・オークション等により入手された場合は、弊社サポート対象外となります。本製品の使用により、生じた損害、逸失利益又は第三者からのいかなる請求についても当社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。



付属品・各部説明

ディスプレイ

機能ボタン

- プラスボタン
- 電源ボタン
…電源 ON/OFF
- マイナスボタン

温度感知センサー

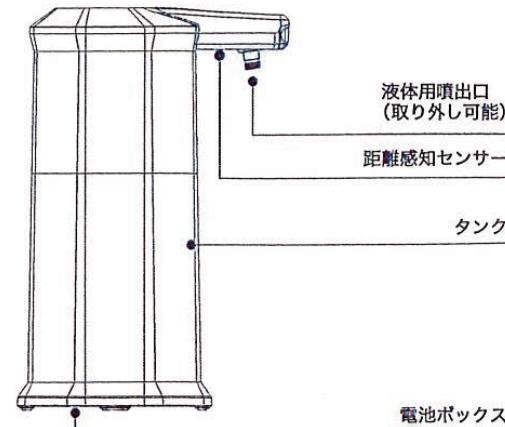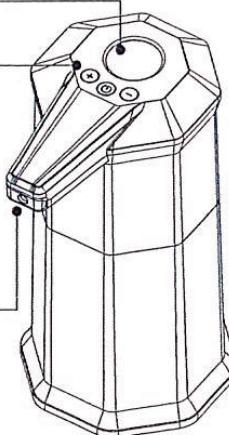

ご使用方法

1.電源をつける

①本体の電池ボックスに単四形乾電池×4本を入れます。

▲充電式の電池・マンガン電池では正常に動作しない可能性がございます。アルカリ乾電池をご使用ください。

②電源ボタンを5秒ほど長押しすると電源がつきます。

2.タンクに任意の液体を入れる

※液体を入れる前に使用する液体に合わせて噴出口を付け替えてください。

●噴出口の取り外し方

出荷時噴出口は液体用噴出口が取り付けられています。



ジェルやソープなど、粘度の高い液体を使用する場合は、液体用噴出口を反時計回りに回し、外した状態でご使用ください。

①本体からタンク部分を取り外し、タンク内に任意の液体を入れます。

液体アルコール・次亜塙素酸水・アルコールジェル・ソープ対応

3.ディスペンサーを使用する

①本体の距離感知センサーに手をかざすと噴出口から液体が噴出します。距離感知センサーと噴出口を覆うように手をかざしてください。

●液量の調整

①画面が表示されている状態で、本体のプラスボタンとマイナスボタンを同時に押すと、液量の調整に入ります。液量は5段階で調節が可能です。デフォルトでは3の状態で設定されています。

②プラスボタンを押すと液量のレベルが1段階増加し、マイナスボタンを押すと液量のレベルが1段階減ります。最大/最小の液量になるとビープ音が長く鳴ります。

③ディスプレイが消灯すると設定完了です。

※電池を抜くと設定はデフォルトに戻ります。

4.温度計を使用する

①本体前面にある温度感知センサーに対象物をかざすと温度の測定が可能です。

(推奨距離：温度感知センサーから2-3cm)

●ディスプレイの表示とビープ音

<32°C : 「LO」と表示（測定不能）

32~37.2°C : 測定結果が表示
ディスプレイが緑に点灯し
ビープ音が1回鳴る

37.3~37.7°C : 測定結果が表示
ディスプレイが黄色に点灯し
ビープ音が2回鳴る

37.8~42.5°C : 測定結果が表示
ディスプレイが赤色に点灯し
ビープ音が3回鳴る

>42.5°C : 「HI」と表示（測定不能）

②連続して測定する場合には、一度センサーから対象物を遠ざけ、改めて近づけてください。
画面が点灯している状態でも連続で測定が可能です。

●設定の変更

画面が表示されている状態で電源ボタンを3秒ほど長押しすると各種設定の変更が可能です。

電源ボタンを短く押す毎にディスプレイに（F-0）（F-1）（F-2）（F-3）と表示され、それぞれ各種設定が可能です。設定は以下の通りです。

①F-0/F-1…機能設定はございません。

②F-2…アラート温度設定

ディスプレイにF-2と表示された状態でプラス/マイナスボタンを押すと、アラート温度の設定が可能です。アラート温度は37.5°C~38.6°C間で調整が可能です。

電源ボタンを短く2回押し、測定画面に戻ると設定が完了します。

③F-3…ビープ音ON/OFF

ディスプレイにF-3と表示された状態でプラス/マイナスボタンを押すと、ビープ音のON/OFFの切り替えが可能です。（1…ON/O…OFF）
電源ボタンを短く1回押し、測定画面に戻ると設定が完了します。

ご使用方法

○本製品は医薬品・医薬部外品ではありません。○実際の温度と多少の誤差が生じる場合がありますので、取引または証明用として使用することはできません。○液体の種類を替える際はタンクをしっかりと洗浄してから入れ替えてください。○液体を入れる際は本体の電子部分に液体がかからないよう十分にご注意ください。○周囲の温度が大きく変動する場合（室内から屋外など）は、10分程度放置してから測定してください。○周囲の温度が16°C以下または40°C以上の場合は温度の誤差が非常に大きく出る可能性があります。○充電池・マンガン電池はご使用いただけません。

安全上の注意 ご使用前に必ずお読みください。

▲警告

○異常を感じたら、直ちに使用を中止し、電池を抜いてください。○子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしないでください。○分解・修理・改造しないでください。○お手入れや移動の際は必ず電池を抜いてください。○濡れた手で電池の交換をしないでください。○古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使わないでください。○電池の+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。○万が一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。

▲注意

○長期間使用しない場合は電池を外し、タンクを乾燥させた状態で保管してください。○強い衝撃を加えたり、変形、落下せたりしないで下さい。○高温多湿な場所には置かないでください。○長時間、直射日光の当たる場所に置くと、変色／劣化する恐れがあります。直射日光の当たる場所は避けで下さい。

保証書 RS-E1526 2in1温度計・ディスペンサー

| | |
|-----------------|--------------|
| ご購入日 | 年 月 日 |
| 保証期間：ご購入日より6ヶ月間 | |
| 販売店 | 販売店名・住所・電話番号 |

お買い上げ日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には無償で交換等対応店させていただきます。

商品と本保証書を表示のうえ販売・または販売店舗までご連絡ください。

保証期間内でも、次のような場合には保証対象外となります。

●ご購入日・ご購入店舗が不明な場合。

●本書の掲示がない場合（販売店発行の保証書シール、レシート、納品書等ご購入年月日が証明できる書類にて代替することができます。）

●使用上の誤り、改造や不当な修理による故障やお買い上げ後の落下等お客様の過失、故意による故障、甚年劣化による故障。

●火災・地震・水害・落雷、その他天災地変等外因による故障または損傷。

●オークション等個人売買により取得された場合。

本書は複数枚ある場合、最初のものにおいて本書を交換等対応店へお渡しするものです。手帳裏面によって本書の表紙の順序を異にするものではありません。

本書は日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。