



新型コロナウイルス
【研究用】

抗原検査キット 唾液式

◎ 変異株対応

SARS-CoV-2 Antigen Test Kit-Saliva

- 検査用 取扱説明書 -

検査用セット **1** 回分

【はじめに】

ご使用に際しては注意事項をよくお読みいただき、ご使用される方ご自身の責任による自己採取のもと正しくご使用してください。

【お取り扱いについて】

本キットは、体外用診断医薬品ではなく、研究用製品です。

本キットは、研究用製品の為、日本での確定診断には使えません。

本キットは、新型コロナウイルス抗原 (SARS-CoV-2) の有無を判定します。

本キットは、体内のウイルス量、検体の量、検査タイミングによっては検出できない可能性があります。


本キットの判定が陰性であっても、SARS-CoV-2感染を否定するものではありません。

本キットで陽性の結果は、病歴、RT-PCRなど、その他の利用可能なデータと

併せて検討する必要がありますので、医療機関に相談してください。

本キット使用により発生したいかなる損害および損失について、弊社では責任を負いません。

【セット内容】

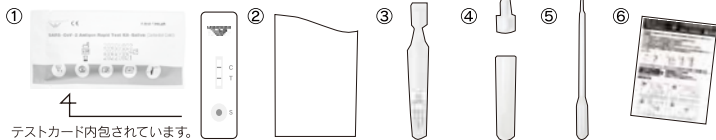

- ① テストカード 1個
- ② 唾液採取カップ 1個
- ③ 希釈液 1個
- ④ 抽出チューブ 1個
- ⑤ スポイド 1個
- ⑥ 取扱説明書 (本書)


*本キット外観・内容物形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

検査前について


※検査前に必ずお読みください

- 検査は室温(15~30℃)で行ってください。
- 唾液サンプルを採取する60分前に、口の中の異物を水ですすいでください、以降の飲食・歯磨き・うがい・喫煙などはお控えください。
- テストカードは開封後、30分以内にご使用ください。
- 検査時、テストカードは平らな場所において行ってください。
- 唾液採取前はリラックスしてください。頬を指で優しく15~30秒マッサージしてください。


検査手順

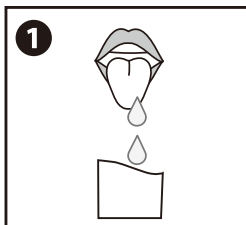


検体採取カップで唾液を採取します。

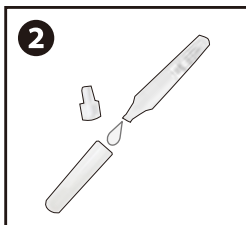

抽出チューブに希釈液を全部入れる。

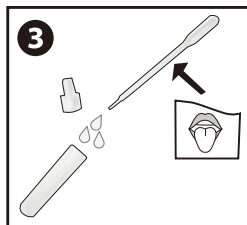


採取した唾液をスポイドで吸引し抽出チューブに3滴入れる。

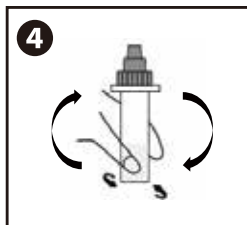

抽出チューブのキャップをしっかりと取り付け、内部を混ぜ合わせます。

※テストカードは水平な場所に置いて動かさないでください。

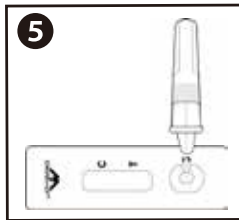

④で混ぜた液をテストカード下段の穴に3滴入れます。




→15分後に検査結果の確認をします。

※20分以降の判定は無効


判定方法

※数分経過すると[C|T]の場所に線が出現します。


判定の目安は下記の図を確認してください。

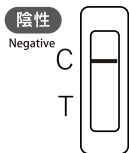

陰性
Negative

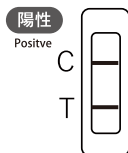

陽性
Positive

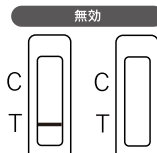

無効

コロナウイルス抗原が存在しないが、検出レベルを下回っています。

コロナウイルス抗原が存在します。他の診断情報を取得してください。

Cラインに線が出ない場合は無効です。溶液が不十分か利用方法が不適切な可能性があります。新しいキットで再度お試しください。